


產品型號

型號	規格
SC-0001A	1劑/盒
SC-0001B	2劑/盒
SC-0001C	5劑/盒
SC-0001D	20劑/盒

產品內容



<確認所有組件齊全>

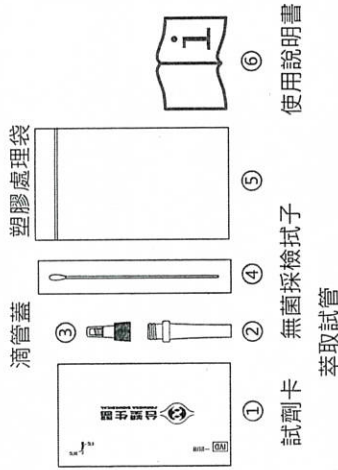

-3-

測試前準備




- 準備具計時功能之設備。(如手機、計時器)
- 確認產品保存期限，超過標示之保存期限請勿使用。
- 以肥皂及清水確實清潔雙手。
- 小心撕除萃取試管上方鋁箔封膜，液體不要溢出，並插入外盒上的試管孔槽中備用。

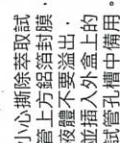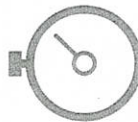

-4-

檢測步驟

- 將採檢後之拭子放入含萃取液之試管中，沿管壁旋轉混合10次。
- 一手擠壓試管壁捏住拭子，另一手將拭子抽出，盡可能將液體留於試管中。
- 將滴管蓋旋入萃取試管，並打開滴管蓋上方白色蓋頭。
- 自切口撕開鋁箔包裝，取出試劑卡，平放於操作台面，於試劑卡的加樣區(S)中滴入3滴處理後的萃取液。
- 等待15分鐘後即可判讀結果。(超過20分鐘可能出現不正確的結果，請勿判讀)
- 檢測完成後，將萃取試管的白色蓋頭蓋回擰緊，並將使用後的試管、拭子、試劑卡放入塑膠處理袋中，封緊後依右側藍框說明處理。

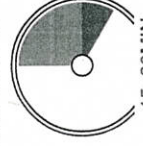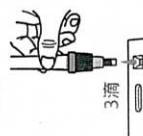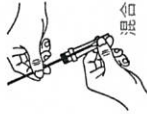


-5-

結果判讀

陽性反應

當檢測結果於判讀區出現二條色帶時(即C區及T區皆出現色帶)，不論色帶顏色深淺，皆應判定為陽性結果。

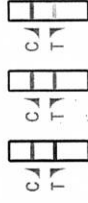

陰性反應

當檢測結果於判讀區之C區出現一明顯色帶，T區未出現色帶時，應判定為陰性結果。



無效結果

若反應時間已到，但判讀區未出現任何色帶，或是判讀區中的C區未出現色帶，應判定為無效結果。



- 若檢測結果為陽性，請將檢體及檢測裝置密封包裝，並至鄰近的社區採檢院所進行再次篩檢時，交付予社區採檢院所進行醫療廢棄物處理。
- 若檢測結果為陰性，請將檢體及檢測裝置密封包裝，並將所有測試包材料丟棄在垃圾桶內。

i 建議看一次操作影片再開始檢測



詳細操作影片

-6-